

静電気を生じない
金属製スプレー


Vortex ボアテックス 取扱説明書

- このたびは、Vortex ボアテックスをお買い上げいただきありがとうございます。
- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- この取扱説明書を必ず保管してください。

概 説

Vortex ボアテックスは、定量噴霧吸入器 (MDI) を吸入する際に口腔内への薬剤沈着を減らすために使用する吸入補助具です。ボアテックスは従来のプラスチック製スプレーと異なり、静電気を生じさせない金属製スプレーですので、噴霧された薬剤が静電気によってスプレー内に吸着するのを防ぎます。また、特殊な溝がついたアダプターにより、患者の吸気によってスプレー内に渦状の気流が起きるため、吸気流量が少ない患者でも効率よく吸入できます。ボアテックスは、市販されている全てのMDIに利用できます。

- ⚠
- ・本品の使用に先立って必ず医師に相談し、定量噴霧吸入器 (MDI) の用法・用量については、必ず医師の指示に従ってください。
 - ・汚れたスプレーを使用して感染するなどの危険を防ぐために、この取扱説明書の「洗浄・消毒」の項をよく読み、全ての部品の洗浄・消毒・乾燥や保管は、その指示に従って行ってください。
 - ・本品は一人の患者が使用し、同スプレーを複数の患者と共用しないでください。
 - ・本品には小さな部品も含まれているため、子どもが誤って飲み込まないようにご注意ください。また、3歳以下の子ども手の届かないところに保管してください。
 - ・ご使用の際、高い吸入効果を得るために、全ての部品をしっかりと正しく組み立ててください。
 - ・マウスピース、マスクなどの付属品は、専用の製品をご使用ください。部品が破損、紛失などした場合は新しい部品をご購入ください。
 - ・本品を使用する前に、念入りに手を洗い、必要に応じて消毒するなど、一般的な衛生面の処置を行ってください。

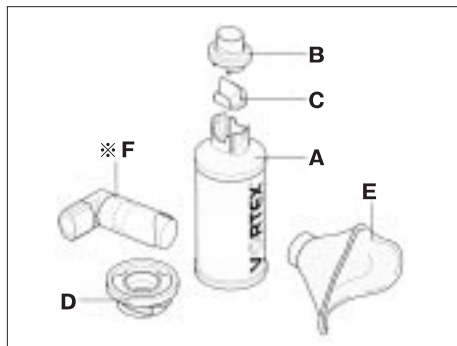

標準セット内容

静電気を生じない金属製スプレーVortex ボアテックスは以下の部品で構成されています。

- A** 金属製スプレー本体
- B** マウスピース
- C** 呼気バルブ
- D** リング状接続アダプター
- E** マスク (セットに含まれていないものもあります。)

※ **F** 定量噴霧吸入器 (MDI) (医師の指示により処方されたもの。セットには含まれていません。)

操作方法

- ① 毎回ご使用になる前に、スプレー本体 (A) に傷や異物などがついていないかご確認ください。
- ② MDI (F) をよく振ってからキャップを外します。
* 薬剤によって使用方法が異なる場合もあるので、ご使用になる定量噴霧吸入器 (MDI) の取扱説明書をよく読んでからスプレーをお使いください。
- ③ MDIのマウスピースをボアテックスのリング状接続アダプター (D) に差し込んでください。
- ④ マウスピース (B) を口にくわえてください。マスク (E) を使用する場合は、鼻と口を覆うようにマスクを顔にぴったり当ててください。
- ⑤ MDIの取扱説明書に従って、ポンベを押してスプレー本体 (A) 内に薬剤を噴霧してください。
 - ・ ゆっくりと深く息を吸い込んでください。
 - ・ 吸い込んだ状態で数秒間息を止めます。
 - ・ ゆっくりと息を吐き出します。
- ⑥ 吸入を繰り返す場合には、一旦吸入を終え、MDIの取扱説明書に従って、適切な時間をおいてから再度吸入してください。

